

# SHARPSGUARD®

## Mode d'emploi



0.3L, 0.5L, 0.6L, 1L, 2.5L, 3.75L, 5L, 7L, 11.5L, 22L, 22Lxa, 22Lra, 24L, 24Lxa, théâtre+ conteneurs

### Montage

Les conteneurs de 0,3 L, 0,5 L, 0,6 L et 1 L sont pré-assemblés. Indiquez sur l'étiquette le nom de votre établissement, votre service et la date de mise en service.

Pour assembler les conteneurs de 2,5 L, 3,75 L, 5 L, 7 L, 11,5 L, 22 L, 22 Lxa, 22 Lra, 24 L, 24 Lxa et Théâtre+, placez le couvercle sur le conteneur, l'ouverture à l'avant, près de l'étiquette, et appuyez fermement de chaque côté. Tournez le conteneur de 90° et appuyez à nouveau fermement.

Vérifiez que le conteneur est correctement assemblé avant d'indiquer sur l'étiquette le nom de votre établissement, votre service et la date de mise en service.



### Placement

Les conteneurs doivent être placés en toute sécurité, conformément à vos politiques internes. Selon leur taille, des plateaux, supports ou supports mobiles POUDES® sont disponibles si nécessaire.

Propriétés produits: Résistance à la perforation, Résistance à la chute, Résistance des dispositifs de préhension, Étanchéité

	0.3L	0.5L	0.6L	1L	2.5L	3.75L	5L	7L	11.5L	22L	22Lxa	22Lra	24L	24Lxa	theatre+
Capacité utilisable autorisée (L)	0.24	0.4	0.49	0.84	2.21	2.98	3.98	5.80	9.27	17.86	16.98	17.26	20.06	20.06	32.0
Masse brute autorisée (kg)	0.9	1.09	1.13	1.15	1.23	1.30	2.34	2.44	3.62	5.94	6.06	6.03	5.96	6.04	9.73
Poids de remplissage maximal (kg)	0.17	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	5	5	5	8
Poids à vide du conteneur (g)	72	88	126	154	232	298	341	437	622	943	1036	1035	965	1048	1728

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter votre responsable régional ou notre service client au +44 1865 371841 ou à l'adresse [info.healthcareUK@mauserpackaging.com](mailto:info.healthcareUK@mauserpackaging.com), et consulter notre site web [www.daniels.co.uk](http://www.daniels.co.uk).



[www.daniels.co.uk](http://www.daniels.co.uk)



[info.healthcareuk@mauserpackaging.com](mailto:info.healthcareuk@mauserpackaging.com)

Sauf indication contraire, les informations contenues dans le présent document sont fournies à la demande spécifique de l'utilisateur et ont été mises à disposition par Daniels Healthcare.



LINE, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris

REDEFINING SUSTAINABILITY

Autoclavable à 121°C avant utilisation  
ATTENTION: Ne jamais forcer pour l'introduction de déchets.  
Déchets à éliminer conformément à la réglementation en vigueur.  
Produits conformes à la norme. NF X 30-511:2016 et son annexe A

### Utilisation sûre

- Entre chaque utilisation, la porte des conteneurs doit être refermée temporairement.
- Évitez de laisser tomber des instruments tranchants dans la poubelle depuis une certaine hauteur ; déposez-les délicatement comme indiqué sur l'image.
- Remplissez le conteneur jusqu'au repère de remplissage, sans jamais le surcharger.
- Ne forcez pas pour introduire des objets tranchants dans le conteneur.
- Une fois rempli jusqu'au repère de remplissage, verrouillez-le à l'aide de sa fermeture définitive et de l'étiquette indiquant la date de verrouillage.
- Une fois verrouillé, ne tentez pas de le rouvrir ou de le réutiliser.
- Si possible, utilisez un extracteur de lames pour détacher les lames du manche du scalpel avant de le jeter.
- Ne mettez pas la main dans la poubelle : n'essayez jamais de récupérer ou de pousser des objets dans la poubelle pour objets tranchants.

### Manutention

Utilisez la poignée de transport pour déplacer ou manipuler le conteneur. Soyez toujours prudent lors de la manipulation de tous les conteneurs pour objets tranchants et déchets médicaux.

### Élimination

**Respectez la réglementation locale:** jetez le conteneur conformément à la législation locale relative aux déchets médicaux.

**Ne jetez pas le conteneur avec les ordures ménagères:** les conteneurs pour objets tranchants ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères ni recyclés.